

Montage Press-on prisma

Last Modified on 26/11/2019 10:07 am EST

Montage "Press-on" prisma's

- Haal de press-on lens uit zijn houder en zoek de basis, aangegeven door "base".
- Haal het glas uit het montuur. Plaats de gladde zijde van de press-on lens tegen de vlakste zijde van het brillenglas en aligneer het. Druk het zachtjes tegen het brillenglas aan en teken de vorm af. Let er vooral op om alleen op het te verwijderen deel te schrijven, daar inktsporen later moeilijk te verwijderen zijn.
- Knip de juiste vorm uit de press-on lens door middel van een scherpe schaar, of gebruik een zeer scherp mesje.
- Knip de vorm op de juiste grootte uit, maar klein genoeg. De press-on lens mag niet over de biseau gaan, noch tegen de montuurrand drukken.
- Plaats het glas terug in het montuur. Reinig en spoel grondig het oppervlak van het brillenglas. Dompel daarna zowel glas als press-on lens in warm water onder. Positioneer nu de press-on met de gladde zijde tegen de vlakste zijde van het brillenglas. Haal het geheel uit het water en hou de press-on lens op haar plaats. Indien nodig kan men de press-on lens nog ajusteren door het lichtjes te draaien. Verwijder alle luchtbelletjes met de onderzijde van de duim. De press-on lens mag enkele uren niet aangeraakt worden.

Opgelet

- Tijdens het monteren moet de press-on lens gevrijwaard blijven van vuil, stof en vet.
- Vermijd te schrijven op het bruikbare deel van de press-on lens. Geen gebruik van alcoholstiften.

Montage prismes "Press-on"

- Sortez la lentille press-on de la boîte et cherchez la base, indiquée par "base".
- Sortez le verre de la monture. Appliquez la face lisse du press-on contre la face la plus plate du verre et alignez le press-on. Appuyez le doucement contre le verre et tracez la forme. Faites attention de ne pas écrire sur la partie à utiliser, car les traces d'encre sont difficiles à enlever.
- Utilisez une paire de ciseaux pour couper la forme de la lentille press-on, ou un couteau à lame tranchante. Faites attention de couper la forme de grandeur exacte. La lentille press-on ne peut pas dépasser le biseau ni toucher le bord de la monture.
- Remplacez le verre dans la monture. Nettoyez et rincez à fond la surface du verre. Ensuite immergez le verre et la lentille press-on dans l'eau chaude. Ensuite positionnez la lentille press-on avec sa face lisse contre la face la plus plate du verre. Sortez le tout de l'eau en gardant la lentille press-on en place. Si nécessaire, vous pouvez réajuster la lentille press-on en la tournant légèrement. Faites en sorte d'écarter toutes les bulles d'air avec le dessous du pouce. La lentille press-on ne peut être touchée pendant plusieurs heures.

Attention

- Pendant le montage, il est nécessaire de préserver la lentille press-on de la poussière, saleté et graisse.
- Il faut éviter d'écrire sur la partie à utiliser. Les marqueurs à alcool sont déconseillés.

(26/11/2019)